

GENGIGEL®

Forte

orális gél

*Ideális sebek kezelésére és a posztoperatív időszakban.
Egyszerű, gyors és hatékony alkalmazást biztosító készítmény.*

A nagy molekulásúlyú hialuronsav különösen nagy koncentrációban található az egészséges fogíny szövet külső rétegeiben, ahol hozzájárul a barrier funkcióhoz és a periodontális szalag szakítószilárdságához. Jelenléte elengedhetetlen a fogíny szövet egészségének megőrzésében.

A hialuronsavnak számos előnyös tulajdonsága van, amelyek hozzájárulnak a fogászati kezelések sikeréhez és az eredményes száj-higiéniai programhoz.

Kiemelendő, hogy a hialuronsav saját száraz tömegének 50-szeresével megegyező mennyiségű vizet tud felvenni.

Ez a tulajdonság - azzal együtt, hogy vizes közegben jellegzetes molekulakonformációt vesz fel - lehetővé teszi, hogy a hialuronsav - igen hatékony természetes védőgátat képezve - megakadályozza a mikroorganizmusok és egyéb, a parodontális betegségek kialakulásában szerepet játszó toxinok behatolását.

Védőfunkciójának köszönhetően a Gengigel® Forte elősegíti a fájdalom csökkentését, támogatja a szövetek természetes regenerációját olyan traumás események után, mint a műtétek, implantáció, fogeltávolítás, gyökérsimítás, stb., továbbá elősegíti a víz felszívódását, ezáltal mérsékli az ödémát és enyhíti a gyulladós folyamatot.

A Gengigel® Forte:

- Nem állati eredetű, biotechnológiai úton előállított, kiemelkedő minőségű és magas tisztasági fokú hialuronsavat tartalmaz, nagy molekulatömegű nátriumsó formájában.
- Hosszan tartó lokális hatása van.
- A termék speciális formulájának köszönhetően a fogíny nyálkahártyájához tapad.
- Korlátozás nélkül alkalmazható minden betegcsoportnál, beleértve a gyermekeket, várandósokat, időseket és cukorbetegeket.

Javallatok

Tulajdonságainak köszönhetően a Gengigel® Forte különösen ajánlott a nyálkahártya védelmére a következő esetekben:

- mély ínysérülések,
- traumák, sebészeti vagy periodontális beavatkozás, fogeltávolítás vagy szubgingivális gyökérsimítás után kialakuló gyulladt és/ vagy fájdalmas területek.

Használati útmutató

Közvetlenül a fogászati kezelést követően vigyen fel egy kis mennyiségű gél az érintett területre az applikátor segítségével, vagy kézmosást követően ujjbeggyel masszírozza gyengéden az ínyre, amíg a teljes érintett területet be nem fedi.

Alkalmazza naponta egy vagy két alkalommal, vagy szükség szerint, amennyiben orvosa másképp nem rendel.

Összetétel

Fő összetevő: Nátrium-hialuronát

Egyéb összetevők: Aqua, Xylitol, Cellulose gum, Alcohol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, Glycerophosphocholine, Sodium phosphate, Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Dichlorobenzyl alcohol, Trisodium phosphate, Sodium lactate, Sodium hydroxide.

(Citromsavat tartalmazhat.)

Csomagolás

Gengigel® Forte orális gél 8 ml-es tubusban

Ellenjavallatok: A Gengigel® Forte használata ellenjavallt bármely összetevővel szembeni túlérzékenység esetén.

Övintézkedések és figyelmeztetések: Ne használja a terméket, ha az láthatóan sérült. Szobahőmérsékleten tárolandó; közvetlen hőforrástól védeni kell. Lejárati idő után ne használja. Használat után a termék maradványait el kell távolítani, mielőtt a tartályt lezárja. A készítmény személyes használatra készült. Gyermekektől elzárva tartandó.

Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

A legutóbbi felülvizsgálat dátuma: 2019. április

CE
0051



RICERFARMA s.p.a.

Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricefarma.com
Made in EU