

GENGIGEL®

Hialuronska kislina

Prvi zobki

GENGIGEL® Prvi zobki je inovativen gel, s patentiranim polimernim matriksom, za ustno sluznico.

Je neviden, prožen in odporen film, ki predstavlja učinkovito zaščitno pregrado.

Gel se oprime dlesni in zob otroka, kjer ima dolgotrajno delovanje.

Indikacije: vnetja dlesni, značilna za zgodnje otroštvo, ki nastanejo pri izražanju zob ali kot posledica poškodb. Klinične študije kažejo, da posebna sestava izdelka olajša bolečino in otekanje ter pospešuje celjenje.

Navodila za uporabo: Roke temeljito umijte. Nato s prstom razmažite majhno količino izdelka in ga nežno vmasirajte v dlesni dokler prizadeto področje ni popolnoma prekrito. Priporočljivo je, da gel nanesete po obrokih in pred spanjem. S tem spodbudite nastanek filma in pri otroku podaljšate občutek olajšanja bolečine. Uporabite 3 do 6-krat na dan, oziroma po potrebi.

Sestavine:

Glavna sestavina: Sodium Hyaluronate 0,54%

Druge sestavine: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Polycarbophil, Sodium Saccharinate, Monobasic sodium phosphate, Choline alfoscerate, Trisodium phosphate dodecahydrate, Sodium Lactate, Disodium EDTA, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.

GENGIGEL® Prvi zobki ima prijetno aromo ter omogoča, da se zmanjša uporaba zdravil kot so lokalni anestetiki. Izdelek je brez alkohola in sladkorja. Ne vsebuje umetnih arom, glutena, laktoze, parabenov, natrijevega lavril sulfata ali gensko spremenjenih organizmov. Klinično testirano na dojenčkih.

Kontraindikacije: Izdelka GENGIGEL® Prvi zobki ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katerokoli sestavino.

Previdnostni ukrepi in opozorila: Izdelka ne uporabljajte, če je tuba odprta ali poškodovana. Shranjujte pri sobni temperaturi, zaščiteno pred direktnimi viri toplote. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Po uporabi tubo takoj dobro zaprite. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Posvetujte se z zdravnikom, če boste izdelek uporabili istočasno z drugimi izdelki.

Vsebina: tuba z 20 ml

Distributer: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana